

PROFI-FLÄCHEN-DESINFEKTION

Oberflächendesinfektion auf alkohol Basis



PROFI-SPRAY-OFF



500 ml



1 Ltr.



250 ml



5/10/25 Ltr.

BauA Nr.: 46254

Spray Off ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Präparat zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zwischen Behandlungen und Eingriffen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind.

Gute Hautverträglichkeit bei kurzen Kontakten

Produktdaten gebrauchsfertig aldehydfrei schnell und umfassend bereits in 30 Sek. wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae) MRSA-wirksam wirksam gegen behüllte Viren: BVDV* / Vaccinia HBV/HIV-wirksam rückstandsfrei angenehmer Geruch gute Materialverträglichkeit

Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und den RKI Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren

Anwendungsbereiche Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände in allen medizinischen Einrichtungen sowie für Labor- und Industriebereiche.

Anwendung Spray Off ist gebrauchsfertig. Die zu des-infizierenden Flächen und Gegenstände sind bis zur vollständigen Benetzung einzusprühen. Einwirkzeit: 30 Sek.. Fläche ggf. mit trockenem sauberem Tuch trockenwischen.

Begutachtung Bakterizid, fungizid nach den Standardmethoden der DGHM:

Hygiene Nord GmbH Greifswald 2004 Prof. med. Schubert Frankfurt 2001 Prof. med. Solbach Lübeck 2001 Prof. med. Schubert Frankfurt 2003

Wirksamkeit gegen TB (M.Terrae):

Hygiene Nord Greifswald 2006

Wirksamkeit gegen behüllte Viren: BVDV* / Vaccinia

Dr. Steinmann Bremen 2004

HBV-/HIV-Wirksamkeit:

Dr. Steinmann Bremen 2004

BVDV = Surrogatvirus HCV

Weitere Infos siehe Technisches Datenblatt